

EG-Keeperのパネル設定等の下記のデータのバックアップができます。

- ① 反応時の各枠画像データ
- ② 反応時の各サウンドデータ
- ③ 体温閾値上限・音声の性別・音量


デフォルトの設定ではなく、各枠画像データ・サウンドなど作成して設定していただいたデータをバックしていただけます。EG-Keeperのトラブルで機器が代わった場合、あるいは数台に同じ設定をしたい時などに、バックアップした設定内容を簡単に反映することができます。

ファームウェアで最新のβ版をご使用いただく場合は、ファームウェアのアップデート後に、設定リセットで、一旦、出荷時状態に戻していただく必要があります。この場合、枠画像データ・サウンドデータがデフォルトに戻ってしまいますので、カスタマイズされたデータを設定されている場合は、ファームウェアのアップデート前にバックアップを取っていただき、ファームウェアアップデート後に、カスタマイズされたデータを再設定するのに、ご使用ください


1. 下記、リンクよりUI設定バックアップツールをダウンロードしてください。
<http://wd-s.site/eg-keeper/syukka/20210831/UI設定バックアップツール.zip>
2. ダウンロードしたZipファイルを開いていただくと「UI設定バックアップツール」というフォルダーがありますので、デスクトップなどにコピーしてください。
3. 「UI設定バックアップツール」というフォルダーを開いていただくと、『egkeeper-ui-backup.exe』というファイルがあります。これがUI設定バックアップツールになります。



4. 『egkeeper-ui-backup.exe』をダブルクリックして実行すると下記のような画面が表示されます。

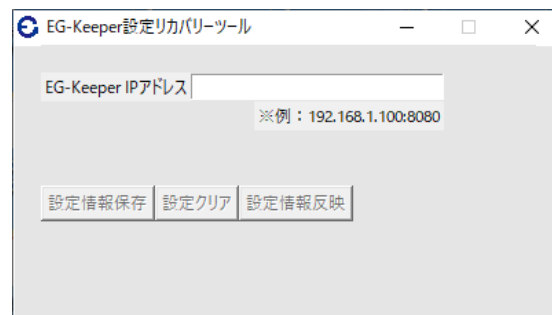


4. EG-Keeper IPアドレスの部分に下記のようにバックアップしたいEG-KeeperのIPアドレスと :8080 を入力して「設定情報保存」をクリックするとバックアップデータが作成されます。

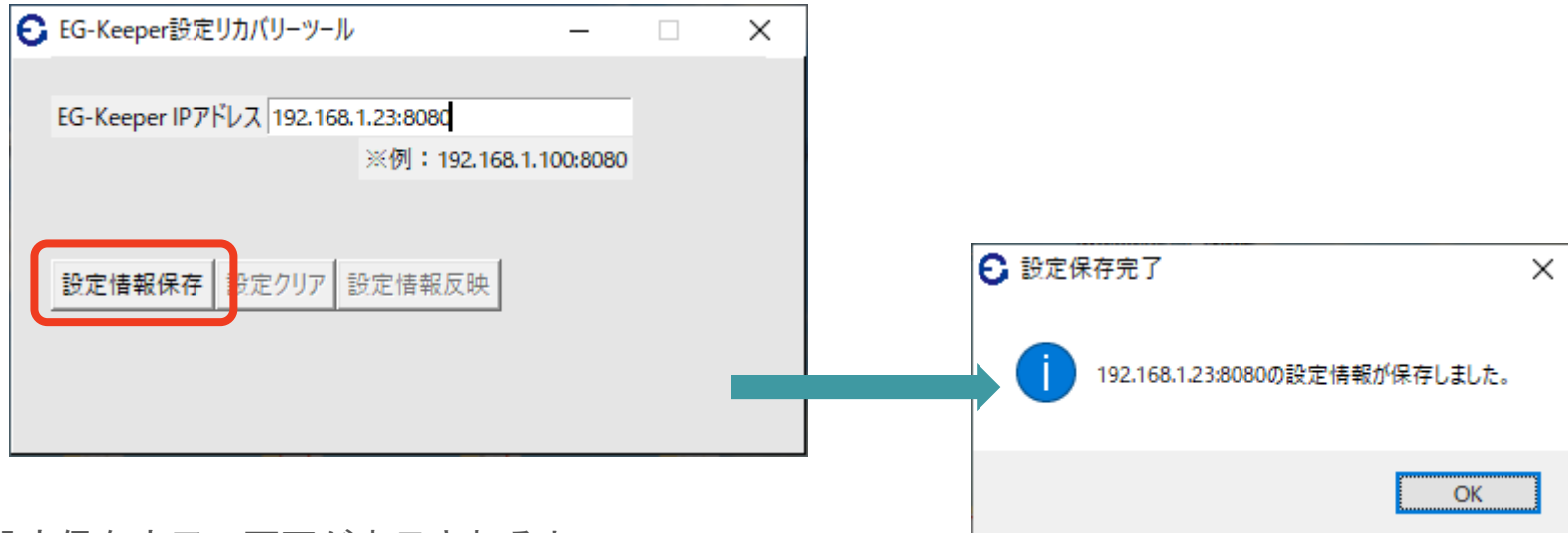

設定保存完了の画面が表示されると egkeeper-ui-backup.exe と同じフォルダー内に下記のように『data』というフォルダーが作成されます。このフォルダー内に設定情報が保存されます。


▶ UI設定バックアップツール

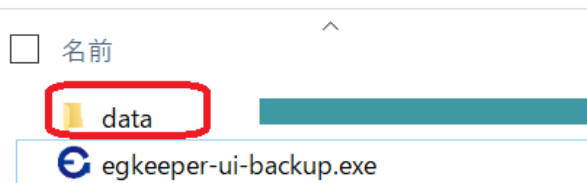


UI設定バックアップツール > data

名前	更新日時	種類	サイズ
AbnormalTemperature.json	2021/08/30 18:34	JSON ファイル	470 KB
LivenessWarning.json	2021/08/30 18:34	JSON ファイル	188 KB
MaskAlarm.json	2021/08/30 18:34	JSON ファイル	454 KB
MaskAndTempPass.json	2021/08/30 18:34	JSON ファイル	692 KB
StartupLogo.json	2021/08/30 18:34	JSON ファイル	1 KB
StrangerWarning.json	2021/08/30 18:34	JSON ファイル	467 KB
ui.json	2021/08/30 18:34	JSON ファイル	2 KB


5. 保存した設定情報を戻したいときは、アドレスの部分に下記のように設定を戻したいEG-KeeperのIPアドレスと:8080 を入力して「設定情報反映」をクリックするとdataフォルダーに保存されている設定情報が設定されます。

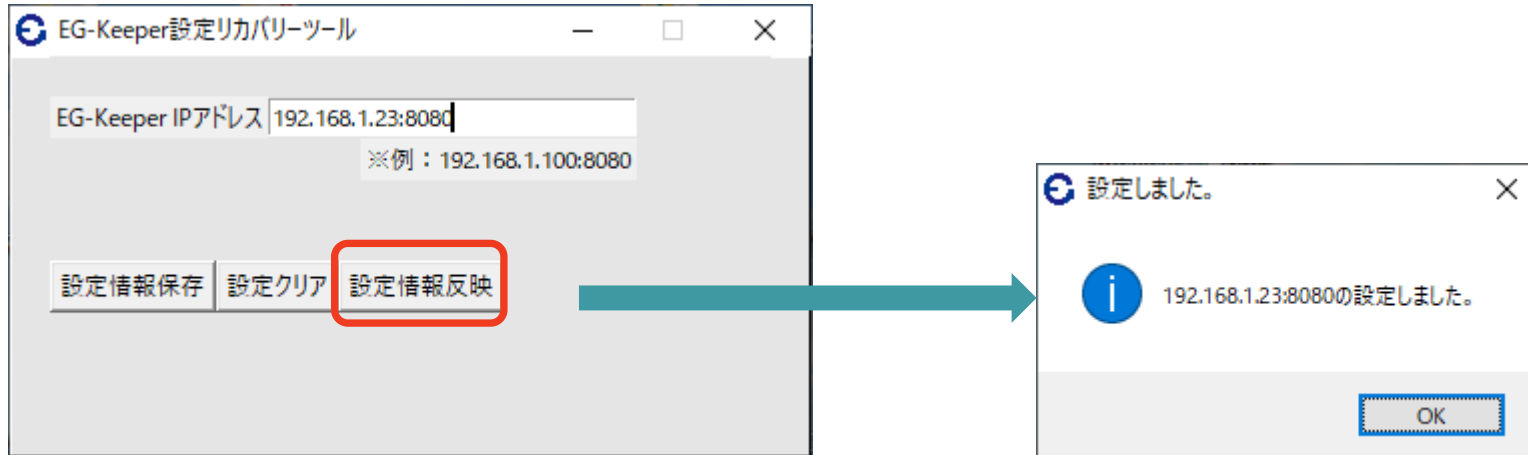


6. 保存した設定情報をクリアしたい時は、「設定クリア」をクリックしてください
Dataフォルダーに保存された設定情報がクリアされます。

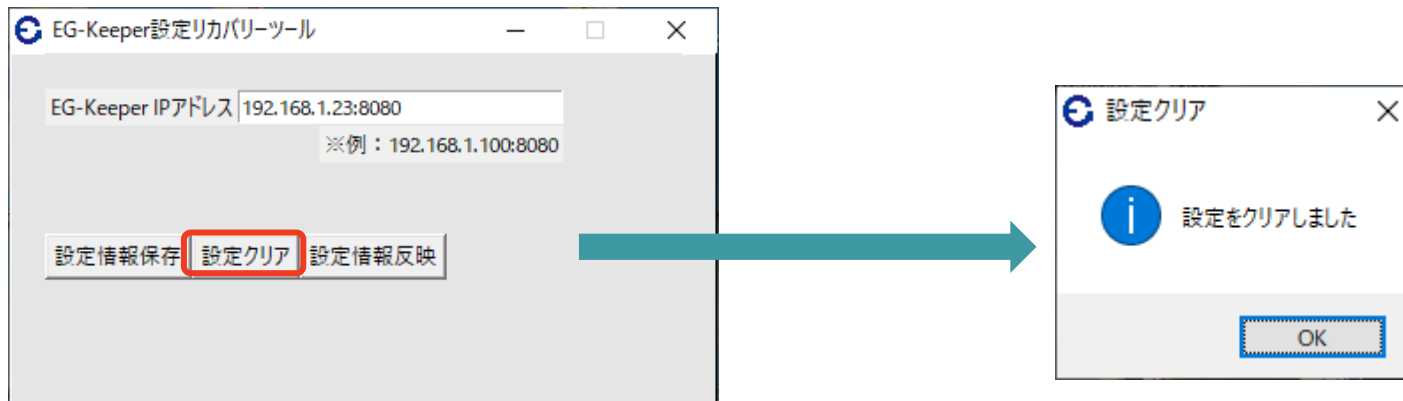

- 設定情報保存・設定情報反映のボタンを押した時に、IPアドレス情報に存在しないIPアドレスを入力して実行した場合は、下記のようなエラーメッセージが表示されます。

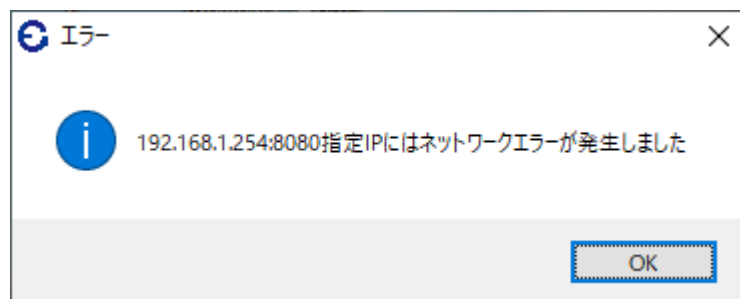

- アプリケーションを終了する場合は、右上のXをクリックして終了してください

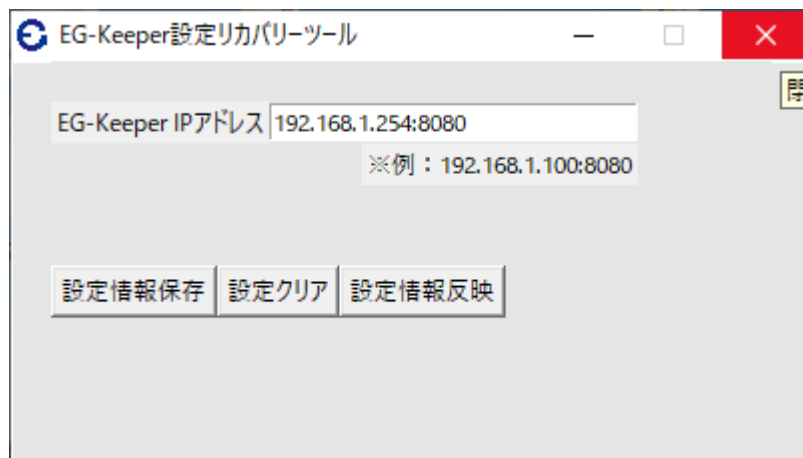






参考

1. 数台のEG-Keeperの設定情報を別々にバックアップして保存する場合

設定の保存をするとdataというフォルダーが作成されますので、1台保存してフォルダー名を例えば、data + IPアドレス (cf. data192.168.1.23)などに変更します。各EG-Keeperの設定を、フォルダー名を変更して保存しておきます。設定を戻す場合は、都度フォルダー名を dataに戻して処理を行います。

▶ UI設定バックアップツール ▶

<input type="checkbox"/> 名前	更新日時
 data	2021/08/30 18:48
 data192.168.1.23	2021/08/30 19:12
 data192.168.1.25	2021/08/30 19:12
 data192.168.1.30	2021/08/30 19:12
 egkeeper-ui-backup.exe	2021/08/30 15:18